




Franko-fix Plus

120 feuchte Einmal-Desinfektionstücher

wirksam gegen Corona-, Rota- & Noroviren

- Schnelldesinfektion Finwirkzeit ab 1 Minute
- wirksam gegen HIV/HBV
- medizinische Reinheit für alle Bereiche
- einfache Handhabung

FRANKFN-Chemie Elisabethstr. 55 · D-32791 Lage Fax 0 52 32 | 95 81 - 40 info@frankengmbh.de www.frankengmbh.de

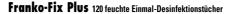

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur Anwendung auf alkoholbeständigen Oberflächen. Ideal zur Schnelldesinfektion

Anwendungsbeschreibung: Zu desinfizierende Fläche abwischen, dabei vollständig benetzt und über die Einwirkzeit feucht halten. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Handschuhe tragen. Die desinfizierte Oberfläche kann nach dem Trocknen wiederhenutzt werden. Nach Gebrauch qut verschließen. Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen. Materialverträglichkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen.

Nach dem Öffnen noch 28 Tage haltbar. Anbruchdatum auf der Packung notieren.

Tränkflüssigkeit: FrankoDes (VAH-gelistet) Tucharöße: 14 x 19 cm

Wirksamkeit der Tränklösung:		
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid: 4 EN13624, EN13727	Felder Test, (geringe Belastung)	konz. 1 Min.
TBC (M. terrae), VAH Methode 9:	(hohe Belastung)	konz. 1 Min.
Vaccinia, DVV/RKI:	(geringe Belastung)	konz. 30 Sek.
Noro-Viren (MNV), EN14476:	(geringe Belastung)	konz. 5 Min.
Rota-Viren, EN 14476:	(geringe Belastung)	konz. 30 Sek.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen, halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen Bei Brand: Kohlendioxid Pulverlöschmittel oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/ regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften

der Entsorgung zuführen. 100 a Lösuna enthalten:

43 a Ethanol, 0.05 a Didecyldimethylammoniumchlorid

BAuA Reg.-Nr.: N-81387

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr. 10.150

Geöffnet am:



siehe Beutel

Achtung





