



DESINFEKTION

FrankoDes Fläche

Flächen- Schnelldesinfektion

- gebrauchsfertige Lösung
- VAH-gelistet
- Einwirkzeit nur 1 Minute



FRANKEN-Chemie
G m b H & C o . K G
Elisabethstr. 55 · D-32791 Lage
Tel. 0 52 32 | 95 81 - 0
Fax 0 52 32 | 95 81 - 40
info@frankengmbh.de
www.frankengmbh.de

1 Liter e

DESINFEKTION

FrankoDes Fläche

Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen.

Anwendung: Gebrauchsfertig zum Auftragen mittels Einmaltuch. Oberfläche vollständig Benetzen und einwirken lassen. Die Fläche sollte während der Einwirkzeit feucht bleiben. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. **Wirkpektrum:** Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, TBC, BVDV / (HCV)-Inaktivierung, Vaccinia, Rota-Viren, Noro-Viren (MNV). **Erste Hilfe:** siehe Sicherheitsdatenblatt (Seite 2). Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf unserer Internet-Seite unter www.frankengmbh.de/info/downloads.de. **Lagerung:** im Originalbehälter an einem kühlen gut belüfteten Ort.

Besondere Hinweise: alkoholische Desinfektionsmittel sollen nicht zur Desinfektion großer Flächen eingesetzt werden. Nicht mehr als 50 ml/m² ausbringen. Nicht in offene Flammen sprühen. Bei alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas Verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

Einwirkzeiten:	
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid:	konz. 1 Min.
TBC (M. terrae):	konz. 1 Min.
Vaccinia:	konz. 30 Sek.
Noro-Viren (MNV)	konz. 5 Min.
Rota-Viren	konz. 30 Sek.

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Brand: Kohlendioxid, Pulverlöschmittel oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden. Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Wirkstoffe** in 100 g: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecylmethylammoniumchlorid.

CE0482

LOT



Art.-Nr.: 10.730



Flasche u. Etikett PE

1 Liter e



Achtung



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7 · 29643 Neuenkirchen
Tel: 05195 / 97 07-0 · www.MaiMed.de